

# AntiDec<sup>®</sup>

Lôžko proti vzniku dekubitov

NOVINKA



AntiDec rieši zmenu dotykových  
plôch ležiacich pacientov  
dlhodobo upútaných na lôžko.  
Pôsobí preventívne proti  
vzniku dekubitov (preležanín)  
a účinne pomáha pri ich liečení.



# AntiDec – princíp funkcie



**Masážny účinok** sa dosahuje dvoma roštami opatrenými predpätými lamelami. V medzerách základného roštu sa vertikálne pohybuje druhý rošt, ktorý postupne preberá hmotnosť pacienta na iné dotykové plošky tela pacienta s lôžkom. Starostlivosť o pacienta na takejto posteli si nevyžaduje pravidelné otáčanie pacienta. Elektrické pohony túto prácu vykonajú podľa nastaveného programu automaticky – bez pomoci zdravotnej sestry.

Ručným ovládačom je možné naprogramovať výmenu roštov na 24 hodinový cyklus v časovom rozpätí 15 – 30 – 60 – 120 minút. Prakticky to znamená preloženie ležiaceho pacienta z vnútorného roštu na vonkajší, čo zabezpečuje pravidelnú zmenu dotykových bodov pacienta s lôžkom.

**Antidekubitný systém** zabezpečuje zmenu dotykových plôch pacienta s lôžkom aj pri zdvihnutých lamelových segmentoch.

## AntiDec®



# AntiDec 01, modelový rad 2013

## AntiDec 01, model Luxus

Táto špeciálna zdravotná posteľ je vybavená nasledovnými funkciami:  
**AntiDec-systém dvojitého roštu** s 24-hodinovým programom zmeny dotykových plôch pacienta a lôžka.  
 Elektronicky nastavenie výšky lôžka s možnosťou nastavenia rôznej výšky polohy hlavy a nôh.  
 Elektronické polohovanie chrbáta a nôh pacienta.  
 Jednoducho sklápatelne obojstranné zábrany proti vypadnutiu.  
 Závesná hrazda.  
 Podvozok na kolesách s brzdami.  
 Doplnková výbava: drevené obloženie rôznych farebných odtieňov podľa objednávky  
 Vonkajšie rozmery: 220 x 105 cm, rozmery matraci: 205 x 95cm



Video: [www.antidec.com](http://www.antidec.com)

## AntiDec 01, model Exklusiv

Špeciálna zdravotná posteľ vybavená funkciami:  
**AntiDec-systém dvojitého roštu** s 24-hodinovým programom zmeny dotykových plôch pacienta a lôžka.  
 Elektronické polohovanie chrbáta a nôh pacienta.  
 Vybavenie: drevené obloženie rôznych farebných odtieňov podľa objednávky  
 Vonkajšie rozmery: 205 x 100 cm, rozmery matraci: 200 x 90 cm

## AntiDec 01, model Standard

**AntiDec-systém dvojitého roštu** pre rôzne typy postelí – nemocničné, ako aj "civilné".  
 Pôvodný rošt postele sa jednoducho odstráni a nahradí sa vložkou **AntiDec**.  
 Funkcie: **AntiDec-systém dvojitého roštu** s 24-hod. programom a elektronicky nastaviteľná časť chrbáta a nôh pacienta.



# AntiDec®

## Výhody mechanickej masáže

### Systém mechanickej masáže pacienta má tieto výhody:

- spoľahlivosť mechanizmu
- riešenie problému pri presúvaní aj spinálnych pacientov (po úrazoch chrbtice s poškodením miechy) z lôžka na lôžko
- masáž aj najcitlivejšej, sedacej časti tela už pri čiastočnom polohovaní lôžka
- jednoducho vymeniteľný matrac
- pohodlnejšie ošetrovanie pacienta pri zvýšenej polohe lôžka
- neobmedzená životnosť lôžka
- presun pacienta z lôžka na lôžko zvládne jeden ošetrovateľ



Systém mechanickej masáže pacienta je patentovaný a registrovaný pod číslom 279889. Výrobok má CE certifikát.

[www.antidec.com](http://www.antidec.com)

## Technické parametre

### Štandardné rozmery lôžok:

dĺžka 2 100 mm, šírka 850 – 1 000 mm, výška 550 – 850 mm

**Pohon:** motory Dewert, Linak

**Ovládanie:** ovládačmi alebo automatickými časospínačmi, u lôžka AntiDec 02 je polohovanie ručné

**Zvláštna výbava:** matrace EUROPUR hrúbky 25 – 80 mm s umývateľným aj elastickým potahom, špeciálne antidekubitné a ortopedické matrace TEMPUR – hrúbok podľa objednávky



Systém prekladania ležiaceho pacienta.

# Návod na použitie

## antidekubitného lôžka AntiDec ovládačom HD43



### Popis

Ovládač HD43 slúži na ovládanie antidekubitného lôžka. Dvojice horných tlačidiel a indikačné LED diody slúžia na riadenie antidekubitného roštu, ktorý môže byť ovládaný priamo, alebo pomocou vstavaného časovača a dve štandardné dvojice tlačidiel v dolnej časti ovládača sú určené k polohovaniu chrbticovej a nožnej časti lôžka.

### Funkcie

Po zapnutí napájania sa rošt presunie do spodnej polohy a časovač je vypnutý.

Ľavá dvojfarebná LED dioda **/A/** signalizuje blikaním pohyb roštu a zmenou farby polohu roštu (počas blikania, ktoré trvá 30 sekúnd ovládač nereaguje na horné dve tlačidlá).

Stlačením ľavého tlačidla **/B/** v prvom riadku možno kedykoľvek (pokiaľ LED neblinká) presunúť rošt do opačnej polohy.

Pravé tlačidlo **/C/** slúži k nastaveniu časovača. Každé jeho stlačenie nastaví nasledujúcu hodnotu:

Vypnuté->15 minút ->30 minút ->45 minút ->60 minút ->120 minút ->vypnuté...

Každý časový interval zmeny styčných plôch lôžka a pacienta je indikovaný jednou z piatich zostávajúcich LED. Pokiaľ nesvieti žiadna, je časovač vypnutý.

Druhý riadok tlačidiel **/D/** ovláda chrbticový diel, ľavé tlačidlo hore, pravé dole.

Tretí riadok **/E/** ovláda nožný diel, ľavé tlačidlo hore, pravé dole.